

Wie man **Boussignac** CPAP mit einem Medikamentenvernebler vorbereitet

1

Wählen Sie die richtige Größe der **AEMMASKE (S/M/L)**

2

Konnektieren Sie das **T-STÜCK** mit der Atemmaske

3

Füllen Sie den **MEDIKAMENTENVERNEBLER** mit dem entsprechenden Medikament

4

Verbinden Sie das Verlängerungsstück mit dem **MEDIKAMENTENVERNEBLER** und der **SAUERSTOFFQUELLE** (Durchflussrate 6L/min)

5

Konnektieren Sie den **MEDIKAMENTENVERNEBLER** an den unteren Anschluss des **T-STÜCK**

6

Schließen Sie einen **HEPA-FILTER** oder **HME/HEPA-FILTER** an die freie Seite des **T-Stück** an.

7

Konnektieren Sie das Verbindungsstück **555.01** an den **HEPA-FILTER**

8

Verbinden Sie das **BOUSSIGNAC** CPAP Ventil mit dem **T-STÜCK 555.01**